

Élimination du ciment provisoire avec temp:ex

Simplement laisser agir en toute sécurité.

temp:ex permet d'éliminer les restes de ciment provisoire de manière douce et aisée, sans travail manuel pénible. Tremper simplement la restauration dans la solution de nettoyage, laisser agir, profiter de ce temps pour d'autres tâches, puis retirer la restauration propre.* Le processus est fiable et libère des ressources.



Renfert

making work easy



Élimination du ciment provisoire avec **temp:ex**

Sécurité plus grande et davantage de temps pour d'autres activités



1

Laisser tremper la restauration pendant 10 min dans temp:ex ...



2

... se consacrer à une autre tâche ...



3

... retirer la restauration nettoyée, terminé.*

temp:ex – les avantages dans votre cabinet

- Flux de travail optimisé par la réduction des étapes de travail manuelles
- Nettoyage doux et sans risque d'endommager la restauration
- Jusqu'à 50 % plus rapide en combinaison avec l'appareil de nettoyage de prothèses SYMPRO



Vous trouverez de nombreux autres conseils et appareils pour simplifier le travail dans votre cabinet et le rendre plus efficace sur : renfert.com/handbook



* Les consignes d'utilisation exactes figurent dans le mode d'emploi.