

SANY 
AIR

OPERATIONS A EFFECTUER AVANT DE CONNECTER SANY AIR AU RESEAU ELECTRIQUE

- 1) Remplir le réservoir du SANY + AIR avec le désinfectant SK
- 2) Revisser soigneusement le réservoir pour éviter les fuites de liquide pendant la phase d'assainissement
- 3) Connecter le tuyau flexible au compresseur
- 4) Connecter la partie opposée du tuyau flexible à la poignée « pistolet » du réservoir
- 5) Brancher le câble électrique au réseau d'électricité
- 6) Activer l'interrupteur 0/1 sur l'appareil
- 7) Pendant l'assainissement, tourner le régulateur de flux liquide sur la poignée « pistolet » pour régler le débit du pulvérisateur
- 8) Pendant la pulvérisation, conserver une pression de travail égale à 2 bars. Cette pression est indiquée par le manomètre et est réglable grâce au bouton rouge, tous deux placés sur le bloc compresseur.

Les informations complémentaires sont disponibles en ligne :

<https://www.tbr.dental/fr/wp-content/uploads/2020/05/Presentation-SanyAir-05-2020.pdf>

